



## INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKA PRZY ŁÓŻKOWA MODEL 385



**Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu.**

**Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.**

**Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń każdego z opisanych w tej instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia.**

## 1. Przeznaczenie i opis wyrobu.

Szafka przy łózkowe stanowią wyposażenie pomocnicze w pomieszczeniach gdzie przebywają osoby wymagające opieki. Jakość wykonania i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne tych mebli gwarantują wysoki komfort użytkownikowi jak i jej opiekunom. Parametry mebli przy łózkowych dopasowane są do innych urządzeń rehabilitacyjnych.

Przy indywidualnym doborze mebli zawsze uwzględnić należy:

- ⇒ sprawność fizyczną i psychiczną użytkownika,
- ⇒ warunki zamieszkania,
- ⇒ inne, konieczne sprzęty rehabilitacyjne.

## 2. Dane techniczne

Parametr / Model	385
Wysokość całkowita	91 cm
Szerokość całkowita	58 cm
Głębokość	45 cm
Kółka jezdne z blokadą	opcja
Wysuwany blat stolika (76 cm x 35 cm)	opcja
Wysokość blatu od podłoża po rozłożeniu	82 cm

## 3. Rozkładanie i składanie stolika

Otrzymujecie Państwo całkowicie zmontowany mebel z wyregulowanym systemem stolika.

### Rozkładanie:

- Przed rozłożeniem stolika zablokować należy kółka jezdne szafki.
- Chwycić za uchwyt stolika i podciągnąć lekko do góry
- W naturalny sposób wysuwać blat stolika do pozycji poziomej.

Składanie stolika wykonać w kolejności odwrotnej.

### **Uwaga:**

- **Przed rozłożeniem stolika upewnić się, że nie będzie konfliktu pomiędzy blatem a leżem łóżka czy innym urządzeniem.**
- **Podczas rozkładania blatu nie wykonywać gwałtownych ruchów mogących spowodować uderzenie pacjenta czy innych przedmiotów w otoczeniu.**
- **Przy rozkładaniu czy składaniu zwracać pilną uwagę aby pomiędzy blatem a innymi elementami szafki nie znalazły się kończyny czy inne przedmioty - groźba przytrzaśnięcia czy innego zranienia.**
- **Przed złożeniem blatu usunąć z niego inne przedmioty.**
- **Przedmioty potrzebne pacjentowi lokować w środkowej strefie blatu.**
- **Bardzo ostrożnie obchodzić się z przedmiotami mogącymi wyrządzić krzywdę pacjentowi np. gorące napoje, zupy itd. (kładzenie takich rzeczy przy krawędzi blatu **jest niedopuszczalne**).**
- **Przed użytkowaniem stolika sprawdzić stabilność całej szafki - blokada kółek.**
- **Meble pomocnicze stosować na powierzchniach płaskich i twardych.**
- **Nie ustawiać szafek wyposażonych w kółka przejazdowe na dywanach czy innych miękkich wykładzinach.**

#### 4. Czyszczenie i pielęgnacja

Meble pomocnicze nie wymagają specjalnego postępowania w zakresie czyszczenia i pielęgnacji.

- Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
- Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.

#### Dezynfekcja

Dezynfekcji dokonywać można ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka.

- w trakcie zabiegu używać należy rękawic ochronnych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta takiego środka,
- wszelkie konsekwencje niewłaściwego stosowania środków dezynfekujących nie obciążają producenta wyrobu dezynfekowanego.

#### 5. Warunki gwarancji

Vermeiren Polska bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas licząc od daty sprzedaży.

**Okres gwarancji dla każdego z wyrobów określony jest w Karcie Gwarancyjnej.**

**Warunki gwarancji będą dochowane o ile nasze produkty używane będą zgodnie z opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.**

Gwarancji nie podlegają:

- koszty transportu, obsługi i inne roszczenia,
- uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez użytkownika,
- elementy ulegające naturalnemu zużyciu i ścieraniu,
- szkody spowodowane wyrobem przez jego użytkownika,
- szkody powstałe przez inne zewnętrzne czynniki,
- uszkodzenia wynikłe przez niestosowanie oryginalnych części zamiennych.

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób, prosimy kierować do punktów sprzedaży u naszych dystrybutorów.

#### 6. Producent:

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.

Ul. Łączna 1

55-100 Trzebnica

Tel. 071/387-42-00

Faks 071/387-05-74

e-mail: [info@vermeiren.pl](mailto:info@vermeiren.pl)

[www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)