

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## KRZESŁO TOALETOWE MODEL 9012, 9042



9012



9042

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo przy wyborze jednego z naszych produktów.

Produkowany przez fabrykę Reha-Pol-A sprzęt jest efektem wieloletnich studiów i doświadczeń. W pracach rozwojowych szczególny nacisk kładziemy na prostotę obsługi oraz bezpieczeństwo naszych wyrobów. Dzięki stosowanemu w fabryce systemowi zapewnienia jakości wg międzynarodowej normy ISO9001:2000 gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów.

**Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń każdego z opisanych w tej instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia.**

## 1. Przeznaczenie i opis wyrobu.

Krzesła toaletowe, model 9012 - nie składany i 9042 - składany zostały opracowane z myślą o zaspokojeniu Państwa oczekiwań. Stabilna, kratowa konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania osobom o znacznej masie ciała (patrz tabela Dane techniczne).

Cechą krzesel jest ich funkcja toaletowa, dzięki wyposażeniu ich w pojemnik sanitarny pod siedziskiem oraz wygodną tapicerkę, stwarzającą duży komfort siedzenia.

Krzesła są przeznaczone do używania w domu i domach opieki społecznej. Dodatkową cechą obydwu modeli jest możliwość używania ich jako krzesła o standardowym znaczeniu. Dodatkowo model 9042 można złożyć, dzięki czemu ułatwione jest jego przechowywanie w małych pomieszczeniach oraz wygodny transport krzesła.

Przy indywidualnym doborze krzesła toaletowego zawsze uwzględnić należy

- ⇒ wzrost oraz ciężar ciała,
- ⇒ sprawność fizyczną i psychiczną,
- ⇒ warunki zamieszkania,
- ⇒ środowisko.

## 2. Dane techniczne

Model 9012	
Wysokość całkowita	920 mm
Szerokość siedziska	470 mm
Szerokość całkowita krzesła	560 mm
Głębokość siedziska	460 mm
Wysokość siedziska od podłoża	510 mm
Wysokość podłokietnika od siedziska	175 mm

Dopuszczalne różnice +/- 10 mm

Całkowita masa krzesła	8.6 kg
<b>Wytrzymałość (max. obciążenie)</b>	<b>95 kg</b>

Model 9042	
Wysokość całkowita (krzesło rozłożone)	920 mm
Wysokość całkowita (krzesło złożone)	1150 mm
Szerokość siedziska	470 mm
Szerokość całkowita krzesła	540 mm
Głębokość siedziska	460 mm
Wysokość siedziska od podłoża	510 mm
Minimalna głębokość po złożeniu	220 mm

Dopuszczalne różnice +/- 10 mm

Całkowita masa krzesła	7.8 kg
<b>Wytrzymałość (max. obciążenie)</b>	<b>80 kg</b>

### 3. Wyposażenie standardowe

- tapicerowana deska toaletowa i nakładane siedzisko,
- tapicerowane oparcie,
- tapicerowane podłokietniki, (składane do góry w modelu 9042),
- podwieszany pojemnik toaletowy z przykrywką,
- instrukcja postępowania,
- karta gwarancyjna.

### 4. Opis postępowania

#### 4.1 Funkcja toaletowa

Modele 9012 i 9042 posiadają specjalny pojemnik toaletowy mocowany na szynach pod siedziskiem. Wyciągnięcie pojemnika jak i jego założenie jest możliwe od bocznej strony krzesła.

**Uwaga!** Zawsze należy sprawdzić czy pojemnik jest właściwie osadzony na prowadnicach i czy jest dosunięty do oporu – tak aby był dokładnie w świetle otworu w siedzisku.

#### 4.2 Składanie i rozkładanie krzesła model 9042

W celu złożenia krzesła do pozycji transportowej należy:

- wyciągnąć całkowicie pojemnik toaletowy,
- zdjąć nakładane siedzisko,
- złożyć podłokietniki „do góry”,
- trzymając za oparcie i zewnętrzną krawędź deski toaletowej składać je „do siebie” aż do odczuwalnego oporu.

Rozkładanie wykonujemy na podobnej zasadzie tylko w odwrotnej kolejności.

Uwaga! Krzesło jest prawidłowo rozłożone, gdy rury ramy przedniej znajdują się w skrzydełkowych gniazdach.

### 5. Zasady bezpieczeństwa

Aby korzystanie z wyrobu było bezpieczne należy pamiętać:

- przed siadaniem upewnić się, że krzesło stoi na płaskiej poziomej powierzchni i jest całkowicie rozłożone (model 9042),
- nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń (patrz tabela Dane techniczne).
- zwracać uwagę na odpowiedni stan stopek przy nóżkach (uszkodzenie lub ich brak stwarza niebezpieczeństwo „poślizgu” podczas siadania lub wstawania z krzesła).

## 6. Przeglądy

### 6.1 Przed każdorazowym użytkowaniem

Podobnie jak i inne wyroby, krzesła należy przeglądać co zapewni ich prawidłowe funkcjonowanie i komfort użytkowania przez długi czas:

- ⇒ sprawdzać stan stopek,
- ⇒ sprawdzić sztywność mocowania elementów tapicerowanych,
- ⇒ sprawdzać stan powłoki tapicerowanej.

### 6.2 Co 6 miesięcy

⇒ przeprowadzić gruntowne czyszczenie,

Wszelkich napraw oraz montażu można dokonywać jedynie na bazie oryginalnych części pochodzących od naszych dystrybutorów. W przypadku stosowania elementów nieoryginalnych producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.

## 7. Czyszczenie i pielęgnacja

Aby Państwa pojazd zachowywał również odpowiednią estetykę należy zapewnić mu właściwą pielęgnację. W osiągnięciu tego celu pomocne będą poniższe wskazówki.

### 7.1 Tapicerka

- zaleca się mycie ciepłą wodą, przy mocnym zabrudzeniu czyścić ręcznie z zastosowaniem łagodnych środków piorących,
- nie wolno czyścić tapicerki bardzo mocnymi środkami np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi ; niewskazane jest też używanie twardych szczotek,
- za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących nie ponosimy odpowiedzialności,
- nie należy dopuścić do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia,
- czyszczenie strumieniem pary nie jest wskazane.

### 7.2 Elementy z tworzywa sztucznego

Detale takie czyścić należy ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka.

### 7.3 Powłoki zewnętrzne

Zastosowana warstwa lakieru ma duże znaczenie estetyczne i chroni detale wózka przed korozją. Powłoki lakiernicze nie stawiają szczególnych wymogów przy czyszczeniu (zwykle wytarcie wilgotną czy suchą szmatką jest wystarczające). W razie uszkodzeń mechanicznych może nastąpić zerwanie powłoki lakierowanej. Wskazane jest wówczas uzupełnienie ubytku. Miejsca lakierowane narażone na tarcie dobrze jest posmarować cienką warstwą wazeliny technicznej.

Detale chromowane najlepiej czyścić suchą szmatką, a w przypadku przetarcia takiej powłoki zregenerować ją odpowiednim środkiem chromopodobnym.

#### 7.4 Dezynfekcja

Dezynfekcji dokonywać można ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. Pamiętać należy, że mogą one przenikać do wnętrza obić tapicerskich.

- w trakcie zabiegu używać należy rękawic ochronnych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta takiego środka,
- wszelkie konsekwencje niewłaściwego stosowania środków dezynfekujących nie obciążają producenta wyrobu dezynfekowanego.

### 8. Warunki gwarancji

Reha-Pol-A bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas licząc od daty sprzedaży.

Okres gwarancji dla krzesła toaletowego model 9012 i 9042 wynosi 12 miesięcy.

**Warunki gwarancji będą dochowane o ile nasze produkty używane będą zgodnie z opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.**

Gwarancji nie podlegają:

- koszty transportu, obsługi i inne roszczenia,
- uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez użytkownika,
- elementy ulegające ścieraniu,
- szkody spowodowane wyrobem przez jego użytkownika,
- szkody powstałe przez inne zewnętrzne czynniki,
- uszkodzenia wynikłe przez niestosowanie oryginalnych części zamiennych.

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób, prosimy kierować do punktów sprzedaży u naszych dystrybutorów.

Fabryka wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego  
Reha-Pol-A Sp. z o.o.  
Ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Tel. 071/312-18-16  
Faks 071/387-05-74