

Instrukcja Obsługi AS1

1. Ustaw pompę w pozycji horyzontalnej na poziomej powierzchni lub zawieś na panelach łóżka używając haczyków umieszczonych pod pompą.
2. Połóż materac AS1 na materacu –podkładzie i zawiń wyłogi i materaca AS1 pod ten materac zabezpieczając w ten sposób przed przemieszczaniem się . Rurki powietrzne muszą być od strony nóg.
3. Połącz rurki powietrzne z materacem oraz pompą i sprawdź czy nie są poskręcane.
4. Podłącz pompę do odpowiedniej sieci elektrycznej i włącz.
5. W fazie wpompowywania należy ustawić wagę pacjenta na panelu pompy na maksimum. Następnie proszę odczekać 20-30 minut aż materac zostanie napompowany.
6. Przykryj materac odpowiednim prześcieradłem.
7. Ustaw odpowiednią wagę pacjenta na panelu pompy i dokonaj regulacji jeśli jest to konieczne.

Ostrzeżenie: UŻYWAĆ Z DALA OD ŁATWOPALNYCH ŚRODKÓW.



Class I BF ~ 220 V/ 50 Hz / 5 W

Producent:

novacare

Bruchstraße 48 D-67098 Bad Dürkheim

www.novacare .de 0049(0)6322 9 50 50

Dystrybutor:



Vermeiren Polska

Ul.Łączna 1 55-100 Trzebnica

Www.vermeiren.pl 0713874200

