



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
WÓZEK INWALIDZKI SPACEROWY DLA DZIECI
MODEL HEIDI 941, 943, 945**



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń każdego z opisanych w tej instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia.

Wstęp

Pragniemy podziękować Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście dokonując wyboru zakupu naszego wózka.

Jeżeli jest to Państwa pierwszy wózek, radzimy dokładnie przeczytać ten podręcznik. On pomoże zapoznać się z tym sprzętem, da praktyczne rady pomocnicze przy używaniu go przez użytkownika. Udzieli wskazówek jak zadbać o wózek i jak go właściwie obsługiwać.

Przestrzeganie niniejszych rad umożliwi zachowanie doskonałego stanu wózka przez lata ciągłego użytkowania.

Jeżeli będziecie Państwo mieli dodatkowe pytania po przeczytaniu wszystkich informacji, prosimy skonsultować się z najbliższym przedstawicielem.

1. Opis modeli

1.1 Wyposażenie

Każdy wózek w standardzie posiada:

- profilowane siedzisko wypełnione gąbką
- deskę ortopedyczną na plecy
- pasy bezpieczeństwa (barkowo-brzuszne)
- klin
- regulowane podnóżki
- pompkę
- kartę gwarancyjną
- instrukcje obsługi

Wózki Heidi 941, 943 i 945 przeznaczone są dla dzieci z dysfunkcją narządów ruchu i po porażeniach mózgowych. Bogata gama kolorystyczna ram i tapicerki oraz wygodna pozycja siedzenia zapewnia komfort fizyczny i psychiczny dziecku poruszającemu się na wózku.

Heidi 941

Najmniejszy rozmiarowo wózek dla dzieci w wieku do 6 lat i wzroście do 115 cm.

Heidi 943

Pośredni rozmiarowo wózek dla dzieci w wieku do 12 lat i wzroście do 135 cm.

Heidi 945

Największy rozmiarowo wózek dla dzieci w wieku do 15 lat i wzroście do 155 cm.

2. Opis ogólny

2.1 Rozkładanie i składanie

Rozkładanie wózka

Aby rozłożyć wózek należy pociągnąć do góry za uchwyt do prowadzenia wózka aż do całkowitego rozłożenia. Następnie należy zabezpieczyć wózek przed jego samoczynnym złożeniem, poprzez założenie po obydwu jego stronach plastikowych klamer na rury oparcia i uchwyty.



Składanie wózka

Składanie wózka odbywa się w odwrotnej kolejności do rozkładania. Po złożeniu gabaryty wózka się zmniejszają, co ułatwia jego przechowywanie oraz przewożenie nawet w stosunkowo małych autach.



2.2 Mocowanie siedziska i klina

Do konstrukcji wózka jest przymocowane na stałe siedzisko z ceraty. Po rozłożeniu wózka należy ułożyć deskę ortopedyczną w miejscu oparcia pleców, tak aby szczeliny w desce pokrywały się z szczelinami w ceracie siedziska.



Następnie nakłada się tapicerowane siedzisko i przymocowuje się je za pomocą przszytych pasów w dwóch miejscach, pod siedziskiem oraz w górnej części oparcia, tak aby brzegi tapicerki były wywinięte na zewnątrz. Do tak przygotowanego siedziska mocujemy dostarczony klin w trzech dowolnych pozycjach, unieruchamiając go nakrętką motylkową pod siedziskiem.



2.3 Zakładanie paska

W następnej kolejności zakładamy pasy barkowe przekładając je w szczelinach w oparciu. Zszyty koniec paska zakładamy na pasek zamocowany do konstrukcji wózka. Tak przygotowane pasy skutecznie chronią dziecko przed wychyleniem się do przodu i przechyleniem na boki.



2.4 Regulacja kąta nachylenia oparcia


Oparcie można regulować zależnie od potrzeby i ustawiać w dwóch pozycjach.

Aby zmienić pozycję oparcia należy pociągnąć w górę za górną część oparcia obszytego siedziskiem z ceraty a następnie podnieść lub opuścić oparcie. Oparcie zostanie zablokowane bez konieczności dokręcania śrub.



2.5 Regulacja wysokości podnóżka

Podnóżek możemy ustawiać w czterech żądanych wysokościach tak aby stopy dziecka miały prawidłowe podparcie. Regulację wysokości podnóżka dokonujemy za pomocą zatrzasków blokujących. Należy ustawić podnóżek w prawidłowej pozycji i za pomocą zatrzasków zablokować po obydwu jego stronach.

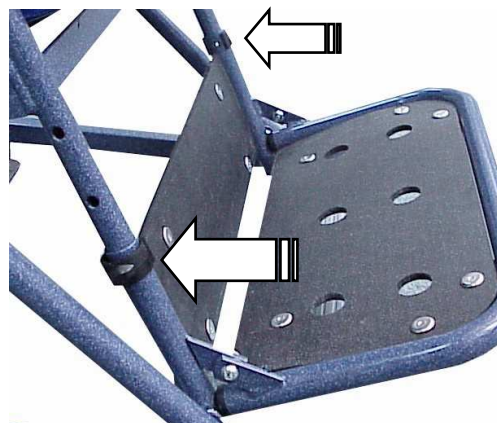

3. Konserwacja

3.1 Co miesiąc

Opony

Sprawdzić ciśnienie w oponach:

Średnica koła	Max ciśnienie
200 mm	2,5 bara
310 mm	2,5 bara

Należy pamiętać aby nie przekraczać dozwolonego ciśnienia. Systematycznie sprawdzać stan opon, w przypadku konieczności ich wymiany zaleca się jednoczesną wymianę opon na jednej osi.

Hamulce

Należy sprawdzić sprawność hamulców po odpowiednim napompowaniu kół. Należy upewnić się, że hamulec styka się z powierzchnią i nie pozwala się kręcić kołu.

Tapicerka i pasy

Należy czyścić tapicerkę wilgotną szmatką. W razie potrzeby można użyć nie żrącego środka czyszczącego. Sprawdzić czy tapicerka i pasy nie są uszkodzone, jeśli tak należy je wymienić.

3.2 Co rok

Zalecamy raz w roku dokładny przegląd wózka w tym sprawdzenie wszystkich nakrętek i śrub.

Właściwe przestrzeganie powyższych zasad zagwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie wózka.

5. Główne wymiary

	Heidi 941		Heidi 943		Heidi 945	
Szerokość całkowita cm	54		63		70	
Długość całkowita cm	105		110		113	
Wysokość całkowita cm	98		98		102	
Odległość siedziska od podłoża cm	44		44		50	
Głębokość siedziska cm	29		35		38	
Wysokość oparcia cm	58		66		74	
Szerokość oparcia cm	28		32		38	
Maksymalne obciążenie kg	25		35		45	
Średnica koła	200 i 310mm		200 i 310mm		200 i 310mm	
Odległość siedziska od podnóżka cm	min	max	min	max	Min	max
	20	40	20	40	32	45

6. Warunki gwarancji

Vermeiren Polska bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas licząc od daty sprzedaży.

Okres gwarancji dla każdego z wyrobów określony jest w Karcie Gwarancyjnej.

Warunki gwarancji będą dochowane o ile nasze produkty używane będą zgodnie z opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Gwarancji nie podlegają:

- koszty transportu, obsługi i inne roszczenia,
- uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez użytkownika,
- elementy ulegające naturalnemu zużyciu i ścieraniu,
- szkody spowodowane wyrobem przez jego użytkownika,
- szkody powstałe przez inne zewnętrzne czynniki,
- uszkodzenia wynikłe przez niestosowanie oryginalnych części zamiennych.

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób, prosimy kierować do punktów sprzedaży u naszych dystrybutorów.

7. Producent:

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.
Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Tel. 071/387-42-00
Faks 071/387-05-74
e-mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl